

東ソーコントロール（HIV Ag／Ab）

本品は、AIA-パックCL[®] HIV Ag／Abに専用のコントロールで、精度管理に用います。

【本質】

- 1. 本品はヒト血清をベースとした凍結乾燥品で、次の 4 種類のコントロールからなっています。
 - 東ソーコントロール（HIV Ag／Ab）陰性
 - 東ソーコントロール（HIV Ag／Ab）陽性 1（リコンビナント HIV-1 p24 抗原含有）
 - 東ソーコントロール（HIV Ag／Ab）陽性 2（HIV-1 抗体陽性ヒト血漿含有）
 - 東ソーコントロール（HIV Ag／Ab）陽性 3（HIV-2 抗体陽性ヒト血漿含有）
- 2. 各コントロールの期待値は以下のとおりです。期待値は測定結果の許容範囲を意味するものではありません。測定結果の管理幅は施設ごとに設定してください。

コントロール名	期待値
東ソーコントロール（HIV Ag／Ab）陰性	< 1.0 Index
東ソーコントロール（HIV Ag／Ab）陽性 1	2.6 ～ 30 Index
東ソーコントロール（HIV Ag／Ab）陽性 2	1.3 ～ 25 Index
東ソーコントロール（HIV Ag／Ab）陽性 3	1.5 ～ 55 Index

【使用方法】

- 1. 本品は凍結乾燥品ですので、それぞれ精製水 2.0 mL を加え、ゴム栓を閉めて、十分に転倒混和して完全に溶解してから使用してください。
- 2. 本品は、装置の取扱説明書及び試薬の電子添文に従って測定してください。

【使用上の注意】

- 1. 本品は上記の用途以外に使用しないでください。
- 2. 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。
- 3. 冷蔵庫から出して使用する際には 15 ～ 25 °C に戻してから使用してください。
- 4. 開封後あるいは調製後の本品は密封して 2 ～ 8 °C 保存した場合 14 日間安定ですが、保存条件によっては安定性が変化する場合もありますので、できるだけ早く使用してください。
- 5. 試験器具などの汚れは判定を誤らせる場合がありますので、清浄なものを使用してください。
- 6. 誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には水で十分に洗い流すなどの応急措置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。また、廃棄する際には大量の水と共に薄めて廃棄してください。

- 7. 本品は HIV 抗体陽性血漿を含みます。HIV 抗体陽性血漿は、HBs 抗原、HCV 抗体及び HIV-RNA の検査を行い、陰性の結果を得たものを使用しています。しかしながら、感染性の危険があるものとして、被検検体と同様に取扱いには注意してください。本品や検体の付着したビベットチップ、手袋などの器具、及び測定終了後の試薬カップはオートクレーブ（例えば 121 °C、20 分以上）などで滅菌後廃棄してください。

【貯蔵方法・有効期間】

- 1. 貯蔵方法 2 ～ 8 °C 保存
- 2. 有効期間 25 ヶ月
※使用期限は、箱、びんのラベルに記載されています。

【包装単位】

品番	品名	包装
0029380	東ソーコントロール（HIV Ag／Ab）	陰性、陽性 1、2、3：各 2.0 mL 用 ×1 本

“ AIA-パックCL ” は東ソー株式会社の登録商標です。

【問い合わせ先】

東ソー株式会社 バイオサイエンス事業部
カスタマーサポートセンター
〒 252-1123 神奈川県綾瀬市早川 2743-1
フリーダイヤル[®] 0120-17-1200
TEL. (0467) 76-5384
FAX. (0467) 79-2550

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売元



東ソー株式会社

東京都中央区八重洲 2-2-1

製造元



東ソー・エイアイエイ株式会社

富山県富山市岩瀬古志町 2 番地